



rollz[®] flex umbrella




Rollz Flex rollatorparaplu Montage- en gebruikershandleiding

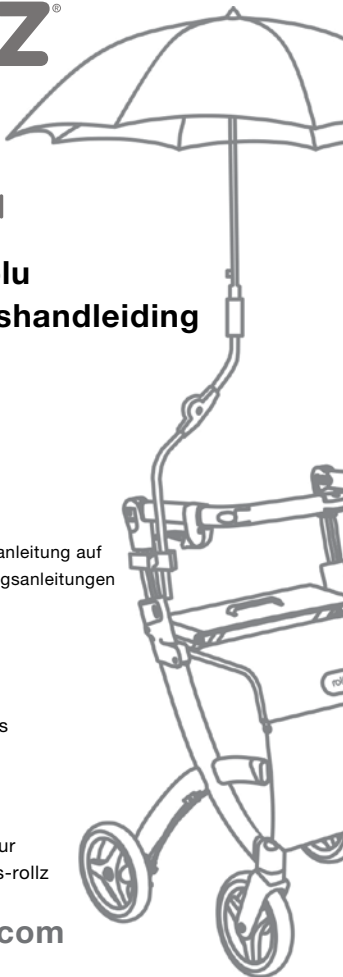

 Deutsche Bedienungsanleitung auf
rollz.com/de/rollz-bediennungsanleitungen



 English manual on
rollz.com/en/rollz-manuals



 Manuel en français sur
www.rollz.com/fr/manuels-rollz

www.rollz.com

Neem voordat u de paraplu monteert deze montage- en gebruikershandleiding goed door.

Inleiding


Gefeliciteerd met uw aankoop van de Rollz Flex paraplu, een oorspronkelijk ontwerp van de firma MPB uit Bielefeld in Duitsland.

Lees, voor het monteren, eerst de volledige handleiding door. Houd alle veiligheidsinstructies in acht. Als u deze nauwkeurig volgt, kunt u vertrouwen op de hoogste kwaliteit en eenvoudige bediening van dit door MPB ontwikkelde product.

Alle MPB paraplu's beschermen u optimaal tegen regen en zon. Zo blokkeren ze schadelijke UV-straling bijna volledig.

Het gepatenteerde Air-Vent-System ontlast de externe krachten op de paraplu aanzienlijk en zorgt voor extra stabiliteit bij winderig weer.

Door de ruimtebesparende opbouw die doorgaans aan de rechterkant van de rollator zit gemonteerd, kunt u uw rollator met beide handen gebruiken, zonder dat u beperkt wordt.

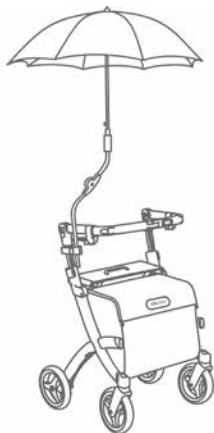

Inhoud van de verpakking

In het pakket vindt u:

- een paraplu met verstelbaar scharnier en beschermhoesje (afbeelding 1);
- een voorgemonteerde bevestigingsklem voor de Rollz Flex (afbeelding 2);
- een inbussleutel voor eenvoudige montage aan uw Rollz Flex.

WAARSCHUWING



Het plastic verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn!

Bewaars de verpakking uit de buurt van baby's en kleine kinderen om gevaar van verstikking te voorkomen.



Afbeelding 1: Rollatorparaplu met een verstelbaar scharnier, ontgrendelknop en hoes.

Monteren aan de rollator

De bevestigingsklem is voorgemonteerd voor montage aan de rechterzijde (wanneer u achter uw rollator staat). Geeft u er de voorkeur aan om de klem aan de linkerkant te monteren? Hoe dit moet, staat beschreven in de paragraaf 'Montage aan de linkerkant'.

De bevestigingsklem bestaat uit twee delen. U bevestigt het rollator-onderdeel aan uw Rollz Flex. Vervolgens bevestigt u de rollatorparaplu in het paraplu-onderdeel. Hieronder lichten wij de montage nader toe.



Afbeelding 2: Voorgemonteerde bevestigingsklem voor de Rollz Flex en inbussleutel.



Afbeelding 3: Alle onderdelen voor de montage aan de rechterzijde van de Rollz Flex zijn al voorgemonteerd.



Afbeelding 4: Monteer de klem zo hoog mogelijk aan de hoogte-instellingsbuis.

Het monteren gaat als volgt:

- Let svp op dat de kleine voorgemonteerde sluitring X tussen de halve klemmen van het paraplu-onderdeel er niet tussenuit valt. Deze sluitring moet in elk geval om de inbusbout gemonteerd worden.
- Monteer de bevestigingsklem met behulp van de bijgevoegde inbussleutel zo hoog mogelijk op de hoogte-instellingsbuis van de Rollz Flex (afbeelding 4). De kunststoffen vleugelmoer waarmee u het scherm strakdraait, moet naar buiten wijzen.
- Draai de schroeven goed vast.
- U kunt nu de paraplubuis van bovenaf in de klemmen van het paraplu-onderdeel plaatsen en de kunststoffen vleugelmoer aandraaien (afbeelding 4).
- Met een stelring Y (afbeelding 5) aan de paraplubuis stelt u de paraplu in op de voor u gewenste hoogte. U kunt uit maximaal zes verschillende hoogten kiezen.
- In naar beneden gebrachte toestand moet de afstand tussen het uiteinde van de paraplu en de grond minstens 3-5 cm zijn.
- De tweede stelring Y plaatst u onder de bevestigingsklem. Hiermee zekert u uw paraplu aan de onderzijde.
- Draai de schroeven twee dagen later nogmaals aan.

Afbeelding 5: Het bevestigen van stelring Y.



Montage aan de rechterkant

De bevestigingsklem is al voorgemonteerd voor montage aan de rechterkant. Deze hoeft u dus niet aan te passen.

Het paraplu-onderdeel van de bevestigingsklem met kunststoffen vleugelmoer is als volgt voorgemonteerd in de montagebeugel:

- Een sluitschroef met vierkant in gat **h**;
- Een inbusbout met platkop in gat **a**.




Afbeelding 6: Rollz Flex met paraplu in de paraplu-klem.

Daarmee is de voorgemonteerde bevestigingsklem ingesteld voor montage aan de rechterkant van de Rollz Flex.

Montage aan de linkerkant

Wilt u de paraplu liever aan de linkerkant bevestigen? Gebruik dan gat **e** in de montagebeugel (Afbeelding 7). Let er svp op, dat de sluitring X, een klein onderdeelje, tussen de beide klemhelften van het paraplu-onderdeel om de lange inbusbout met platkop gemonteerd wordt (Afbeelding 2 en 3).

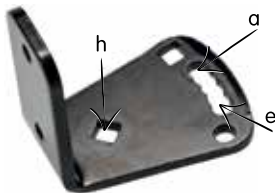

Afbeelding 7: Montagebeugel (onderdeel van de klem).

Bediening van de paraplu

Door de lange, instelbare buis van de paraplu kan deze gebruikt worden door personen tot een lichaamslengte van ca. 200 cm.

Wordt de paraplu niet gebruikt, kan deze op uw Rollz Flex vast blijven zitten. Dan wijst de punt van het scherm aan de zijkant naar onder (Afbeelding 6). Stel de hoogte van de duwbeugel van de Rollz Flex niet te laag in wanneer de paraplu bevestigd is. De punt van de paraplu moet minimaal 3-5 cm van de grond zijn.



Afbeelding 8: Met de vergrendelknop kunt u de paraplu instellen.



Afbeelding 9: Breng de paraplu in de gewenste positie.



Afbeelding 10: Beschermd tegen zon en regen.


INSTRUCTIES

Wij raden u aan om het openen en sluiten van het scherm op een rustig moment uit te proberen, voordat u de rollatorparaplu voor het eerst buiten in de regen gebruikt.

- Deze hoes kunt u met de lus ophangen boven het verstelbare scharnier.
- Breng de paraplu door het indrukken van de grijze ontgrendelknop op het verstelbare scharnier (afbeelding 8) in de gewenste positie (afbeelding 9).
- Door het vastdraaien van de kunststof vleugelmoer kunt u uw paraplu gemakkelijk vastzetten en zekeren tegen verdraaien.
- Open het klitteband van het parapluscherm.
- Druk de openingsknop van de paraplu in.

 Let op! Het parapluscherm opent zich zeer snel - houd de veiligheidsinstructies in acht.

- Heeft u uw paraplu gebruikt, dan rolt u het inmiddels gedroogde parapluscherm op. Volg de vorige stappen in omgekeerde volgorde om de rollatorparaplu in te klappen. Let op dat uw vingers niet tussen de scharnieren klem komen te zitten.

 • Controleer dat het parapluscherm compleet droog is, voordat u uw rollator opbergt.

Waarschuwingen, tips en veiligheidsinstructies

WAARSCHUWINGEN



- De wind kan vat krijgen op iedere paraplu. Waait het, of dreigen windvlagen? Dan mag u de paraplu niet openklappen. Heeft u het gevoel dat de uitgeklapte paraplu het rijden met de rollator negatief beïnvloedt, dan klappt u de paraplu meteen in. Alleen zo kunnen ongevallen en letsel voorkomen worden.
- Het parapluscherm opent zich heel snel als u op de knop drukt. Houd u het parapluscherm van u afgewend. Houd ook rekening met andere personen in de omgeving om letsel te voorkomen.

OPMERKINGEN

- Let op dat de paraplu uitsteekt aan de linker- en rechterkant van de rollator en dat u ergens achter kunt blijven haken.
- Met paraplu is de benodigde doorloophoogte hoger dan zonder. Let hierop, zodat u niet botst met markiezen of luifels.
- Sluit het parapluscherm en klap dit naar beneden voordat u gebouwen betreedt.
- De stoffen bekleding kan door struiken, heggen, hekken, sigarettenpeuken etc. beschadigd raken.
- Wanneer u de paraplu niet gebruikt, beschermt u de hoogwaardige, gedroogde paraplustof door de paraplu te sluiten en in te klappen. Maak deze vast met het klittenband en trek de hoes eroverheen.
- Doe de beschermhoes alleen over een volledig gedroogde

paraplu, anders kan het materiaal gaan schimmelen en/of verkleuren.

- Bescherm uw droge paraplu met de meegeleverde parapluhoes. Voorkom schuring tussen de onderdelen van de paraplu en het handvat en de remmen van de Rollz Flex.
- Het vervangen van defecte onderdelen mag enkel met originele reserve-onderdelen worden gedaan.
- Dit product mag in defecte staat niet worden gebruikt.
- Deze handleiding is onderdeel van deze Rollz MPB-rollatorparaplu en moet daarom worden bewaard. Wanneer u het product aan derden doorgeeft, moet u deze handleiding meegeven. Wijzigingen in de huidige reeks voorbehouden.

LET OP

- Zorg bij gebruik altijd voor een vrij gezichtsveld. Hinder andere voetgangers of weggebruikers niet.
- De paraplu moet zo worden gemonteerd dat de vouwmechanismen en de remmen van de rollator functioneel blijven.
- Test om veiligheidsredenen regelmatig of de schroeven goed vastgedraaid zijn.
- Kijk uit dat uw vingers niet bekneld raken tussen de scharnieren bij het inklappen van de rollatorparaplu.
- Met een rollatorparaplu bent u groter en breder dan zonder parapluscherms. Ook wanneer de paraplu omhoog staat, maar niet geopend is, bent u groter.
- Bij het openen en een geopend parapluscherms bestaat letselgevaar voor anderen door de baleinpunten aan de buitenkant van het parapluscherms.

Garantie

U kunt het product enkel retour sturen vanwege eventuele klachten wanneer het aankoopbewijs is bijgevoegd. Voor het retourneren neemt u contact op met het verkooppunt.

De garantieperiode is twee jaar. Mechanische beschadigingen en brandgaten zijn uitgesloten.

Contact

Rollz International staat open voor verbeteringen of opmerkingen. Daarom willen we graag uw mening horen. Bijvoorbeeld over de gebruiksvriendelijkheid, de handleiding of andere aspecten van onze producten of dienstverlening. Mail uw tips of ervaringen svp naar info@rollz.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung auf www.rollz.com/de/rollz-bediensanleitungen

View the English manual on www.rollz.com/en/rollz-manuals

Consultez le manuel en français sur www.rollz.com/fr/manuels-rollz



Rollz® International bv
Treubweg 51 bg
1112 BA Diemen
Nederland

020 362 20 10
info@rollz.com
www.rollz.com